


快速入门指南

OneTouch Verio Flex® 稳悦智佳® 血糖仪

使用本指南了解您的血糖仪，并遵照里面的步骤开始使用。

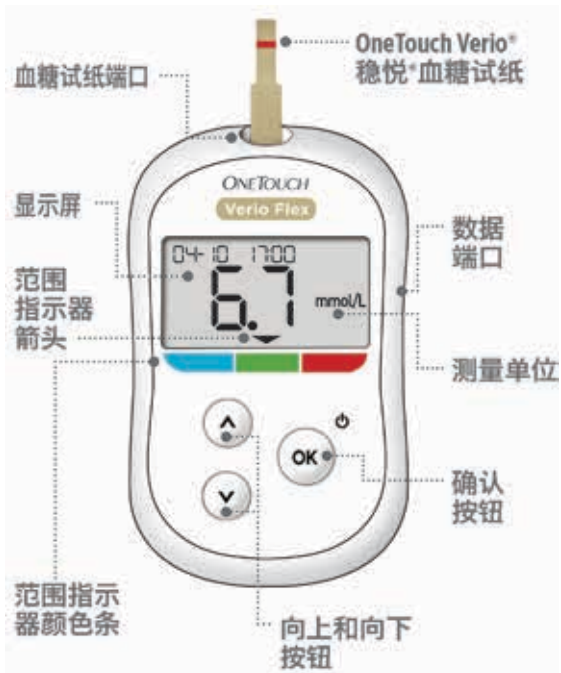

△ 重要：请阅读随系统附送的用户手册。



AW 06939803A

ONETOUCH®


1

在您的系统上设置时间和日期

将其打开

按住 **OK** 直至启动屏显示。

使用 **↓** **↑** 按钮编辑每项设置并按 **OK** 确认。

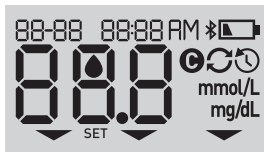


在第一个设置屏上设置时间

- > 小时闪烁。如果正确按 **OK** 或编辑和确认。
- > 分钟闪烁。如果正确按 **OK** 或编辑和确认。



在下一个设置屏上设置日期

- > 年闪烁。如果正确按 **OK** 或编辑和确认。
- > 月闪烁。如果正确按 **OK** 或编辑和确认。
- > 日闪烁。如果正确按 **OK** 或编辑和确认。

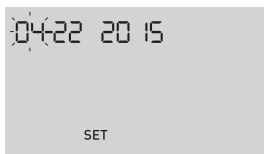

测试就绪

当屏幕有3个短横线出现时您的血糖仪设置完成。



2


执行一项测试

银色叉齿





血糖试纸端口

插入一张血糖试纸（金色侧和2个银色叉朝向您）打开血糖仪。

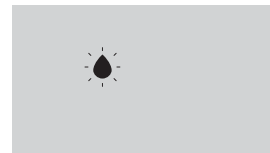

闪烁血滴显示。

通道

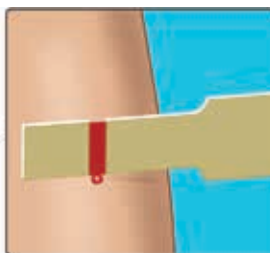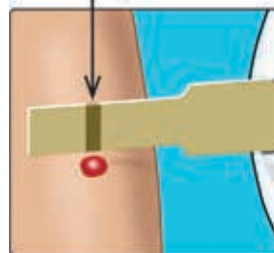

采血得到圆形血滴后，请将手指靠近试纸的侧面，血滴可从左右任意一侧被虹吸入采血窗。
注意：请勿将血液滴在试纸表面。

通道变成红色，且血糖仪从5至1倒计时。

3

查看您的读数




范围内读数的例子

您的读数出现在显示屏上。范围指示器箭头指向蓝色、绿色或红色范围指示器颜色条，以让您知道您的读数是低于、位于或高于您的范围限度。



低于范围读数的例子

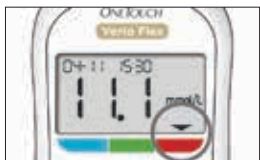

高于范围读数的例子

4

可选：连接至移动设备

您的血糖仪随机带有蓝牙智能技术。这让您可以无线发送您的读数至移动设备，如手机或平板电脑，从中您可以查看它们。


要了解更多关于使用您的血糖仪无线功能的信息及查看兼容性设备与软件应用程序的完整列表，请访问 www.OneTouchChina.cn。

连接您的血糖仪

同时按下 **OK** 和 **^** 以打开或关闭蓝牙功能。当您的移动设备提示时，将在您的血糖仪上显示的PIN输入您的设备。



✱符号意味蓝牙为开。

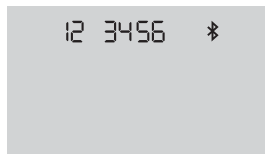

PIN号码例子。

血糖仪符号

	血糖仪电源		蓝牙打开
	电池电量低		历史模式（过去读数）
	电池电量无		应用血样
	质控液		范围指示器箭头
	同步		设置模式

关于范围指示器

您的血糖仪带有范围指示器，其自动让您知道您的读数是低于、高于还是位于您的范围限度内。范围指示器使用的高、低范围限度按以下预置：



预置低范围限度



预置高范围限度

有关更改预置范围限度以适合需要的详情，请参阅您的用户手册。

修订日期：2020/11
© 2018-2020 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 06939803A



Lifescan