






## 第一部分：开始测量


### 了解 OneTouch VerioVue® 稳悦智优® 血糖仪

**OneTouch Verio® 稳悦® 血糖试纸**  
仅需一小滴血液 (0.4 μL)。

**OneTouch VerioVue® 稳悦智优® 血糖仪**  
大屏幕方便阅读。

#### 血糖仪按钮

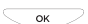
-  血糖仪弹出血糖试纸
-  向上滚动查看屏幕上的条目
-  向下滚动查看屏幕上的条目
-  按下随后松开以返回；按下不放以进入主菜单
-  按下不放以打开/关闭血糖仪；按下随后松开以确认选择

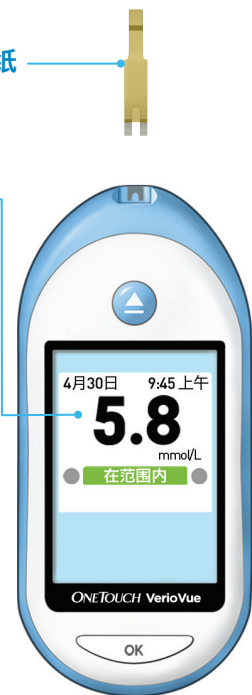

## 进行测量




插入试纸，等待**提供血液**画面出现。  
采血，然后将手指靠近试纸，血液可从左右任意一侧虹吸入采血槽。  
注意：请勿将血液滴在试纸表面。

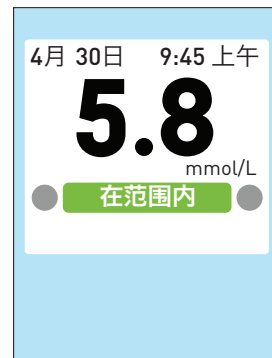


等待血糖仪从 5 倒数到 1，然后显示血糖测量结果。

## 了解您是否在范围内

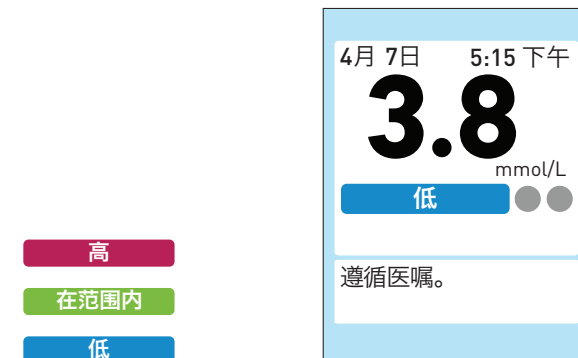


结果下方出现一个彩色条码，让您知道是否处于范围限值之内、以下或以上。  
范围限值是由医护人员在血糖仪中设置的限值。

## 查看 30 天后您怎么样

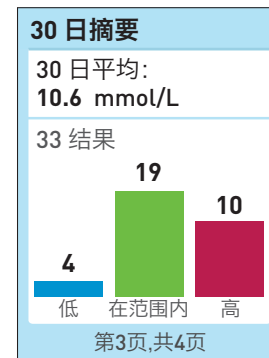

如果您将血糖仪模式设置为提前 30 天，您能在每次测量后看到 30 天摘要。  
条形图显示过去 30 天内**低**、**在范围内**和**高**的结果的数量。




本例向您显示了过去 30 天内，您有 **4 个低**、**19 个在范围内**和 **10 个高**的结果。  
按下  让您进入下一个摘要画面。  
**注：**您还能设置它显示您的 **7 天摘要**。参见操作手册第 6 章。

## 按每天中的时间段确认高和低的数量




按每天中的时间段显示过去 30 天内**低**、**在范围内**和**高**的结果数量（如上所示）。

-  上午：06:00 至 11:00
-  下午：11:00 至 17:00
-  晚上：17:00 至 24:00
-  夜间：24:00 至 06:00

在本例中，您能够看到过去 30 天内大部分**低**（3 结果）位于上午（），大部分**高**（8 结果）位于下午（）。  
在晚上时（）得到的大部分结果在**范围内**（13 个结果中的 12 个）。

## 第二部分：更多信息 添加进餐标记到您的结果

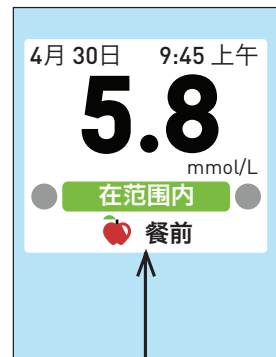

您的标签将  
显示在此处

如果您打开进餐标记，能够添加 餐前或 餐后血糖结果。

餐前：恰好在您开始进餐之前。


餐后：进餐开始后1至2小时。

无标签：空腹时。

单个范围限值根据您所附标记适用于您的结果。

参见操作手册第6章。

## 进餐的影响

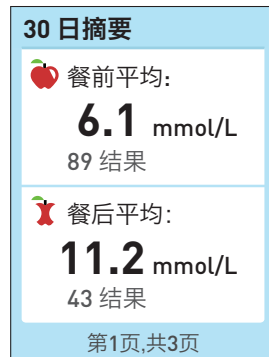

如果您打开进餐标记，您的 餐前平均和 餐后平均将作为您30天摘要的一部分出现。

按下 让您进入下一个摘要画面。参见“查看30天后您怎么样”。

## 查阅过去的结果

结果日志	mmol/L
星期二, 4月30日	
9:45 上午  5.8	
星期一, 4月29日	
11:45 下午  10.1	
星期日, 4月28日	
8:12 上午  6.4	
6:30 上午  5.2	

您能在 **结果日志** 中查阅最近的600个测量结果。

平均	mmol/L
7天 33 结果	6.4
14天 73 结果	8.9
30天 132 结果	10.6
90天 600 结果	7.2

我的历史记录显示最近7、14、30、90天的血糖平均。

## 记住何时测试



您能够设置血糖仪在测量时提示您。

测试提示
提示 1: 每日 - 10:15 上午
提示 2: 星期二 - 9:45 上午
提示 3: 4月30日 - 12:00 下午

最多能够设置3个提示。参见操作手册第6章了解详情。

更多详细信息，请参见《用户手册》。

## OneTouch VerioVue® 稳悦智优® 血糖仪 快速入门指南



从此处  
开启

查看简单，更易理解\*

\*与只显示结果的屏幕相比。



AW 06855903A



修订日期: 2020/11  
© 2018-2020 LifeScan IP Holdings, LLC

